


# Přenosná video lupa

# Uživatelská příručka

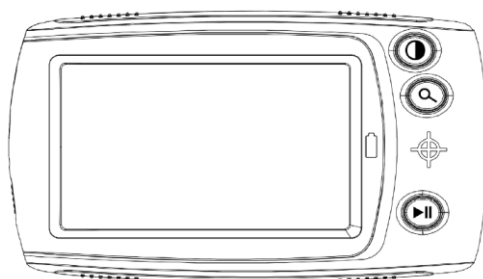

## Vítejte


Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

### Opatření


Zařízení prošlo testováním a bylo zjištěno, že vyhovuje normám pro třídu B digitálních zařízení, na základě části 15, pravidel FCC. Tyto normy jsou navrženy, aby poskytly rozumnou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci a používání v domácnosti.

## Přehled


### Obsah balení

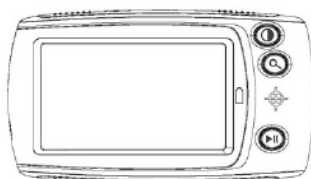

Přenosná video lupa

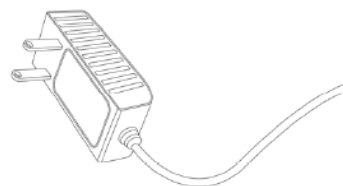


AC nabíjecí adaptér

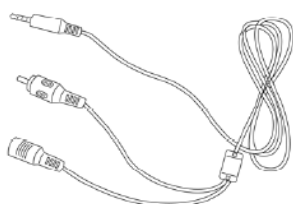

Video kabel  
(pro připojení monitoru s AV-in vstupem)



Přenosné pouzdro se sňůrkou

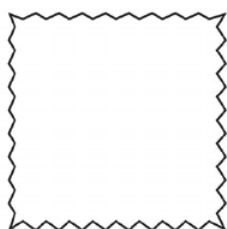


Čistící hadřík



Uživatelská příručka

## Popis přístroje a funkce

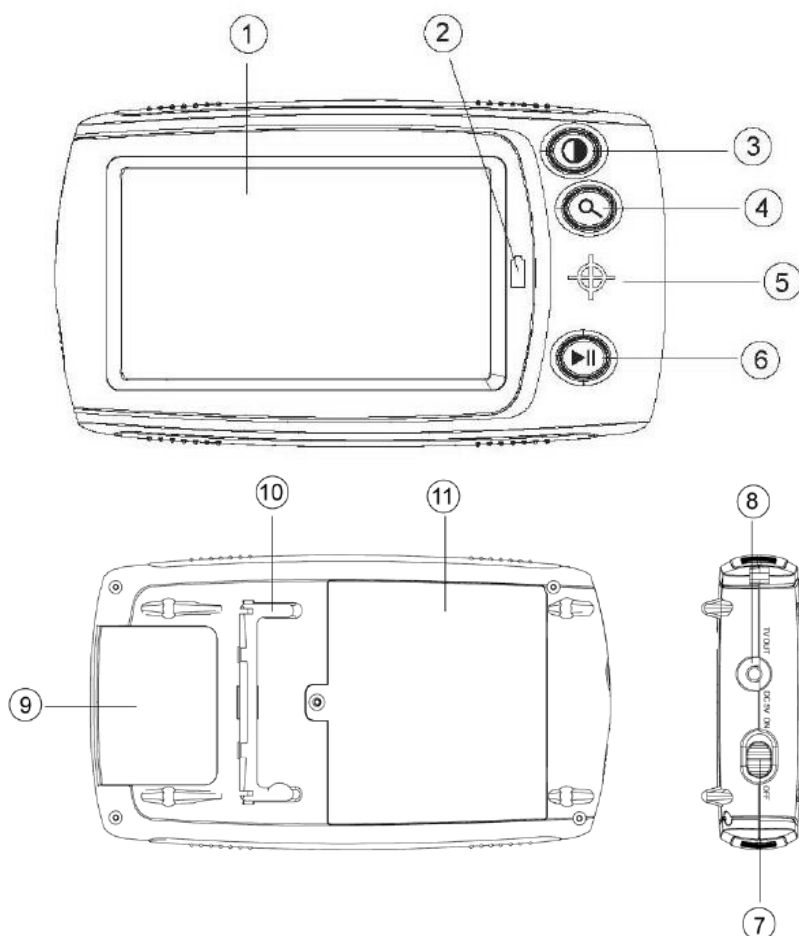

1. 4,3 palcový display
2. Indikátor nabití baterie
3. Video mód
4. Zvětšování
5. Kříž
6. Zastavení/spuštění

7. Vypínací/ zapínací tlačítko
8. Napájení/video port
9. Čočka kamery
10. Stojánek pro psaní
11. Přihrádka pro baterii

## Bezpečnost a údržba

Pro udržení lupy v dobrém stavu následujte tyto pokyny:

1. Přečtěte si instrukce v tomto návodu předtím, než začnete zařízení používat.
2. Nepokoušejte se zařízení opravovat nebo otevírat. Zařízení neobsahuje uživatelsky vyměnitelné/opravitelné části.
3. Nepoužívejte zařízení ve vlhkých oblastech, na dešti a v jiných oblastech s vodou. Zařízení neponořujte do kapaliny.
4. Zařízení používejte v místech s teplotou mezi 10°C a 40°C.
5. Zařízení skladujte v místech s teplotou mezi 20°C a 65°C.
6. Nepokoušejte se připojovat jakýkoliv konektor do napájecího/video portu s použitím nadměrné síly. Všechny vhodné konektory by měly jít jednoduše připojit do portu.
7. K nabíjení baterie používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí originálního balení. Ostatní adaptéry by mohly přístroj poškodit.


## Začínáme

---

### Nabíjení baterie

Předtím, než začnete lupu používat, musíte nabít baterii.

1. Připojte malý konektor nabíjecího adaptéru do Nabíjecího/Video portu ⑧ umístěného na levé straně přístroje. Poté připojte druhý konec adaptéru to běžné AC elektrické zásuvky. LED indikátor baterie ② na přední straně zařízení se rozsvítí červené, což značí, že se baterie nabíjí.

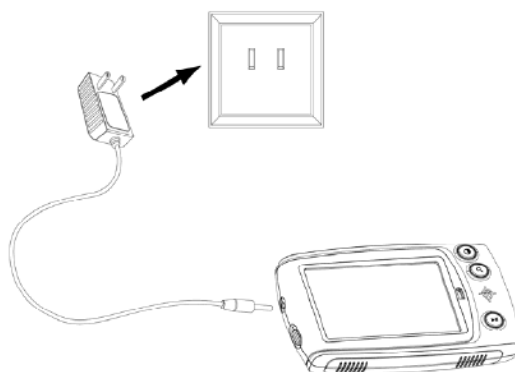





2. Když je baterie nabitá, LED indikátor baterie se rozsvítí zeleně. Poté se LED indikátor vypne.
3. Nyní můžete lupou používat až 4 hodiny nepřetržitě. Když je slabá baterie, v horním rohu začne blikat indikátor slabé baterie. Poté musíte připojit nabíjecí adaptér a baterii znovu nabít.

**Poznámka:** Při nabíjení vždy vypínejte lupu. Pokud bude lupa zaplá, baterie se nebude nabíjet.

### Čtení s lupou


Pro čtení s lupou následujte tyto pokyny:

1. Zapněte zařízení posunutím přepínače ⑦ umístěného na levé straně zařízení do pozice ON (zapnuto).
2. Umístěte lupou rovně na text, který chcete číst.
3. Umístěte kříž , který se nachází pod tlačítkem pro zvětšení přibližně na místo, kde chcete začít číst. Cokoliv pod tímto křížem je zvětšeno a zobrazeno na obrazovce.
4. Posouvejte lupou postupně doprava, abyste přečetli vše až do konce řádku. Posuňte lupou dolů a zpátky doleva, abyste mohli číst další řádek.
5. Pro změnu úrovně zvětšení stiskněte tlačítko zvětšení .
6. Pro změnu barvy na obrazovce, stiskněte žluté tlačítko Video mód , dokud nenajdete pro Vás nejvhodnější barevný mód.
7. Pro zmrazení současného obrazu stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění . Pro opuštění zmrazeného obrazu stiskněte znovu toto tlačítko.

## Používání lupy

---

### Video mód


Stiskněte žluté tlačítko Video Mód  pro listování sedmi různými barevnými módy:

- ◆ Celobarevný mód
- ◆ Rozšířený pozitivní obraz (černá na bílé)
- ◆ Rozšířený negativní obraz (bílá na černé)
- ◆ Žlutá na černé
- ◆ Modrá na žluté
- ◆ Modrá na bílé
- ◆ Žlutá na modré




### Úprava zvětšení


Stiskněte tlačítko  pro listování čtyřmi různými úrovněmi zvětšení.

### Zmrazení obrazu

Stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění  pro přepínání mezi zmrazením obrazu a spuštěním.


### Úprava jasu


Stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, objeví se stupnice jasu na display. Potom stiskněte tlačítko Video mód  pro zvýšení jasu a tlačítko lupy  pro snížení jasu.

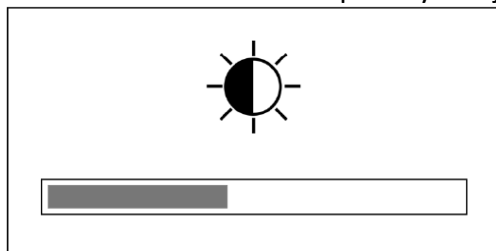

Pro opuštění úpravy jasu stiskněte znovu tlačítko  na 3 sekundy.

### Ukazatel slabé baterie

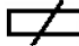Pokud je baterie slabá, rozblíká se symbol  v pravém horním rohu obrazovky, který značí, že je potřeba nabít baterii.

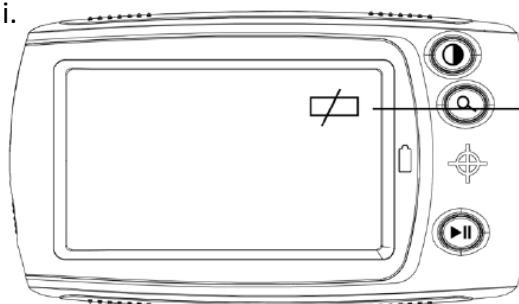


Symbol se objeví a rozblíká, když je nízký stav baterie

## Vypnutí

Přístroj vypnete posunutím posuvníku On/Off (7), umístěného na levém boku přístroje, do pozice Off. Pro šetření baterie je vhodné přístroj vypínat kdykoliv není používán.

## Psaní s lupou

Pokud chcete používat lupu při psaní, na spodní straně lupy je umístěn psací stojánek (10). Tento stojan nadzdvihne část lupy. Zatímco píšete nebo pracujete, na display lupy můžete vidět, co jste napsali.

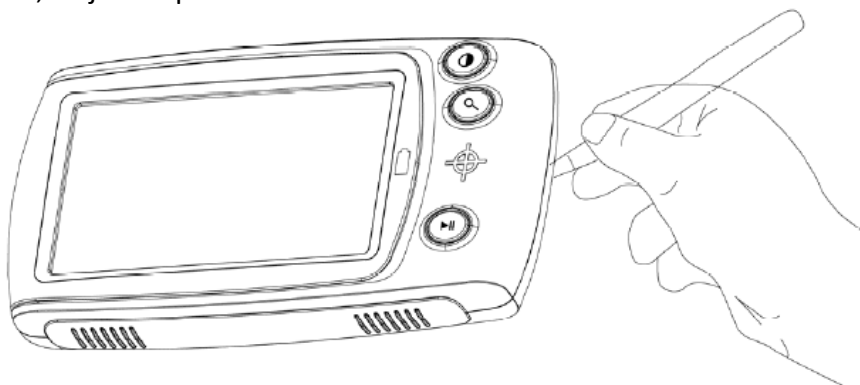

Pro použití stojánku se řiďte následujícími pokyny:

1. Otočte přístroj. Psací stojánek je zapuštěn v blízkosti okna s kamerou.
2. Umístěte prst do mezery mezi stojánkem a přístrojem.
3. Otočte stojánek nahoru a vyklopte ho, dokud nezapadne do pozice.
4. Překlopte přístroj zpět a položte ho na rovný povrch. Nyní můžete psát nebo pracovat s objektem, který je zvětšován.
5. Pokud chcete s lupou číst, zaklopte stojánek zpět.

## Připojení k televizi

---

Pokud potřebujete větší zvětšení než je 4,3 palcový obraz lupy, můžete přístroj připojit k televizi s použitím dodaného video kabelu. Pro připojení lupy k televizi následujte tyto pokyny:

1. Vložte 1/8 palcovou koncovou zástrčku dodávaného video kabelu tvaru Y do přístroje do portu Nabíjení/Video.
2. Vložte RCA zástrčku z video kabelu do vašeho televizoru do žlutého vstupního konektoru. Bližší informace o žlutém vstupním konektoru najdete v uživatelském manuálu Vaší televize.
3. Zapněte televizi. Pokud je to nezbytné, přepněte Vaší televizi na vhodný vstupní kanál. Zvětšovaný objekt se objeví na televizní obrazovce.

**Poznámka:** Pokud chcete nabíjet lupu, která je zároveň připojená k televizi, připojte napájecí adaptér do volného konektoru na konci video kabelu.

Prosíme, abyste nejdříve připojili lupu k televizi a až poté připojovali nabíjecí adaptér.

## Řešení problémů

Problém	Řešení
Obrazovka je prázdná.	Ujistěte se, že lupa je zaplá. Nabijte baterii. Ověřte, že objekt, který chcete zvětšit, je umístěn správně pod křížem.
Přístroj nejde zapnout.	Nabijte baterii.
Obraz na obrazovce je tmavý a zkreslený.	Ujistěte se, že lupa je umístěna na rovném stránce (povrchu), kterou čtete.
LED indikátor baterie není červený, i když nabíjecí adaptér je připojen do zásuvky. Baterie se nenabíjí.	Připojte do portu Power/Video. Ujistěte se, že zásuvka správně funguje. Pokud je adaptér připojen, ujistěte se, že přepínač je zapnutý.
Na obrazovce jsou skvrny nebo šmouhy.	Vyčistěte obrazovku a okno s kamerou (umístěné na spodní straně přístroje).
Text je příliš malý na čtení.	Stiskněte zvětšovací tlačítko.
Lupa je připojená k televizi, ale nezobrazuje se žádný zvětšovaný obraz.	Ujistěte se, že televize je zapnutá. Přepněte na televizi na správný program. Prosíme, abyste nejdříve připojili lupu k televizi a až poté připojovali nabíjecí adaptér, jinak lupa nemusí rozeznat televizi a nabíjecí adaptér zároveň. Ujistěte se, že video kabel je bezpečně připojen k portu Power/Video na lupě a je zapojen do správného video vstupu na Vaší televizi.

Tento symbol na produktu nebo v pokynech znamená, že elektrické a elektronické zařízení by mělo být recyklováno po svém životním cyklu odděleně od domácího odpadu. V Evropské unii existují odlišná sběrná zařízení pro tyto účely. Pro více informací, kontaktujte, prosím, místní orgány nebo vašeho prodejce při koupi.

