


Přenosná video lupa

Uživatelská příručka

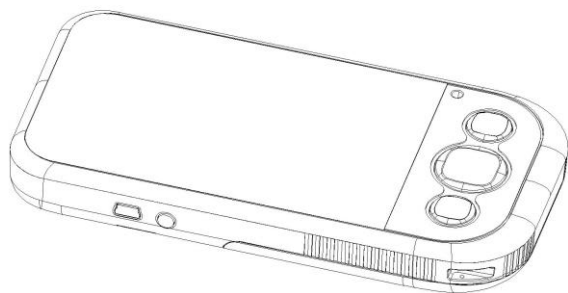

Vítejte




HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi nebo počítači. Je široce využívána ve školách pro slabozraké, ve veřejných knihovnách i dalších institucích.


Přehled

Obsah balení

- | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. Přenosná video lupa | 4. Lithium baterie | 7. Čistící hadřík |
| 2. Video kabel | 5. Poutko | 8. Uživatelská příručka |
| 3. USB kabel | 6. Nabíjecí adaptér | |

Popis přístroje a funkce

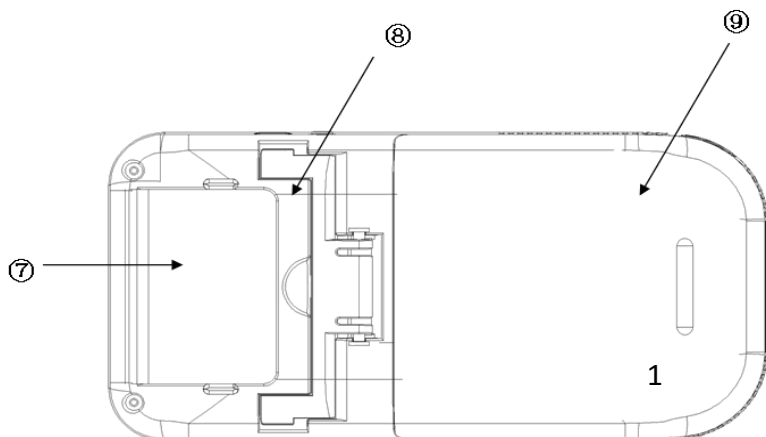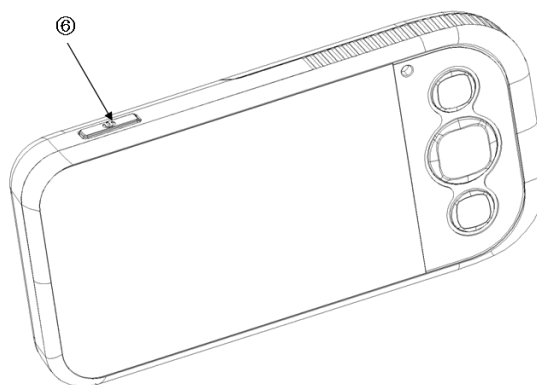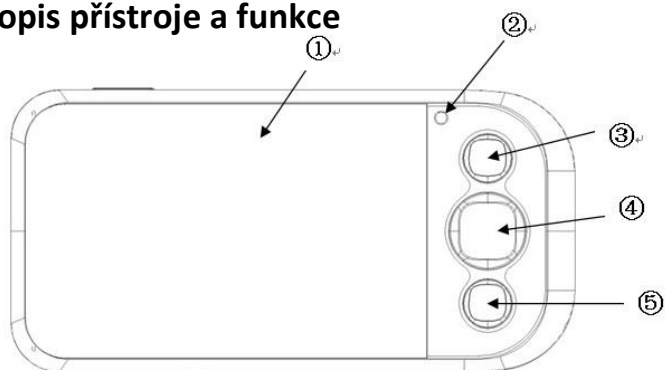

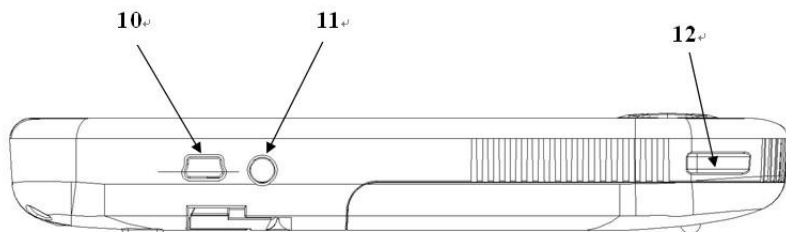


- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. 4,3palcový display | 5. Zastavení | 10. Nabíjecí port |
| 2. LED Indikátor | 6. Vypínací/ zapínací tlačítko | 11. AV výstup |
| 3. Zvětšení | 7. Čočka kamery | 12. Poutko |
| 4. Režim | 8. Stojánek | |
| | 9. Kryt baterie | |

Začínáme

Nabíjení lithium baterie 3 hodiny, používání 4 hodiny

Předtím, než začnete lupu používat, musíte nabít baterii.

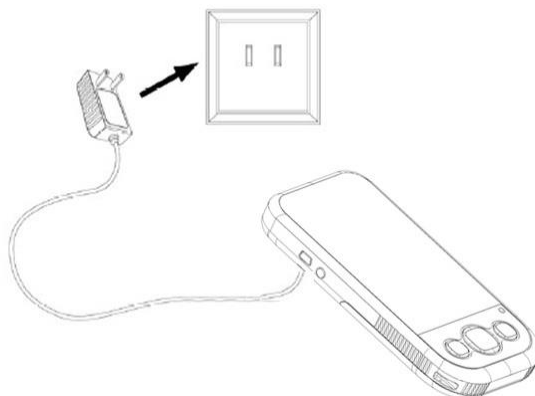

1. Připojte konektor nabíjecího adaptéru do nabíjecího portu přístroje a připojte druhý konec adaptéru do běžné AC elektrické zásuvky. LED indikátor baterie se rozsvítí červeně, což značí, že se baterie nabíjí.
2. Když je baterie nabitá, LED indikátor se vypne.
3. Když je baterie slabá, na display začne blikat indikátor slabé baterie. Poté musíte připojit nabíjecí adaptér a baterii znovu nabít. Pro cestování si vezměte náhradní baterie.



Používání lupy

Čtení s lupou

Pro čtení s lupou následujte tyto pokyny:

1. Stiskněte tlačítko zapnutí na přístroji a LED indikátor se rozsvítí červeně
2. Umístěte lupu rovně na text, který chcete číst.
3. Umístěte kříž + přibližně na místo, kde chcete začít číst. Cokoliv pod tímto křížem je zvětšeno a zobrazeno na obrazovce.
4. Posouvejte lupu postupně doprava, abyste přečetli vše až do konce řádku. Posuňte lupu dolů a zpátky doleva, abyste mohli číst další řádek.
5. Pro změnu úrovně zvětšení stiskněte tlačítko zvětšení .
6. Pro změnu barvy na obrazovce, stiskněte tlačítko Video režim , dokud nenajdete pro Vás nejvhodnější barevný režim.


7. Pro zmrazení současného obrazu stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění . Pro opuštění zmrazeného obrazu stiskněte znovu toto tlačítko.

Video režim


Stiskněte tlačítko Video režim  pro listování devíti různými barevnými režimy:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Celobarevný režim | 4) Modrá na bílé | 7) Žlutá na černé |
| 2) Černá na bílé | 5) Bílá na modré | 8) Žlutá na modré |
| 3) Bílá na černé | 6) Černá na žluté | 9) Modrá na černé |

Úprava zvětšení

Stiskněte tlačítko  pro listování 16 různými úrovněmi zvětšení od 5 do 25x.

Zmrazení obrazu


Stiskněte tlačítko Zastavení/spuštění  pro přepínání mezi zmrazením obrazu a spuštěním.

Vypnutí

Stisknutím zapínacího tlačítka po dobu 3 sekund přístroj vypnete a LED indikátor zhasne. Přístroj má také automatický režim pro šetření baterie – pokud není lupa využívána více než 3 minuty, dojde k automatickému vypnutí.

Psaní s lupou


Odklopte stojánek na spodní straně lupy, použijte pero pro psaní na pravé straně pod kamerou.

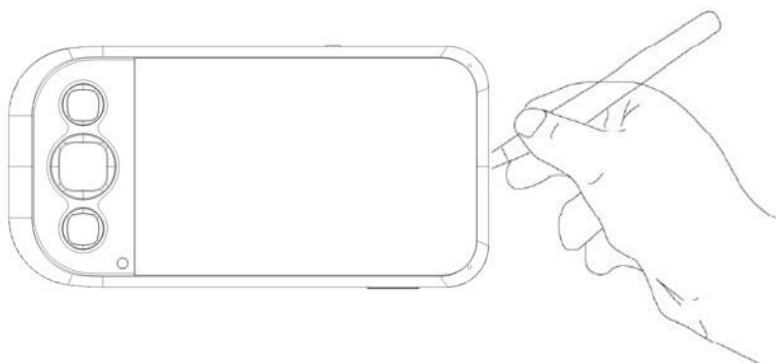

Připojení k televizi

Pokud potřebujete větší zvětšení než je 4,3 palcový obraz lupy, můžete přístroj připojit k televizi s použitím dodaného video kabelu. Pro připojení lupy k televizi následujte tyto pokyny:

1. Vložte 1/8 palcovou koncovou zástrčku dodávaného video kabelu tvaru Y do přístroje do portu AV výstup.
2. Vložte RCA zástrčku z video kabelu do vašeho televizoru do žlutého vstupního konektoru. Bližší informace o žlutém vstupním konektoru najdete v uživatelském manuálu Vaší televize.
3. Zapněte televizi. Pokud je to nezbytné, přepněte Vaší televizi na vhodný vstupní kanál. Zvětšovaný objekt se objeví na televizní obrazovce.

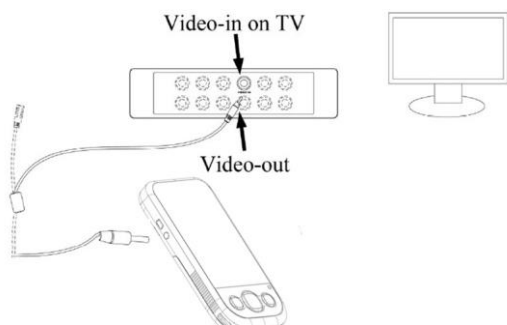

Řešení problémů, bezpečnost a údržba

Problém	Řešení
Obrazovka je prázdná.	Ujistěte se, že lupa je zaplá. Nabijte baterii. Ověřte, že objekt, který chcete zvětšit, je umístěn správně pod křížem.
Přístroj nejde zapnout.	Nabijte baterii.
Obraz na obrazovce je tmavý a zkreslený.	Ujistěte se, že lupa je umístěna na rovném stránce (povrchu), kterou čtete.
LED indikátor baterie není červený, i když nabíjecí adaptér je připojen do zásuvky. Baterie se nenabíjí.	Připojte do portu Power/Video. Ujistěte se, že zásuvka správně funguje. Pokud je adaptér připojen, ujistěte se, že přepínač je zapnutý.
Na obrazovce jsou skvrny nebo šmouhy.	Vyčistěte obrazovku a okno s kamerou (umístěné na spodní straně přístroje).
Text je příliš malý na čtení.	Stiskněte zvětšovací tlačítko.
Lupa je připojená k televizi, ale nezobrazuje se žádný zvětšovaný obraz.	Ujistěte se, že televize je zapnutá. Přepněte na televizi na správný program. Ujistěte se, že video kabel je bezpečně připojen k portu Power/Video na lupě a je zapojen do správného video vstupu na Vaší televizi.

Pro udržení lupy v dobrém stavu následujte tyto pokyny:

1. Přečtěte si instrukce v tomto návodu předtím, než začnete zařízení používat.
2. Nepokoušejte se zařízení opravovat nebo otevírat. Zařízení neobsahuje uživatelsky opravitelné části.
3. Nepoužívejte zařízení ve vlhkých oblastech, na dešti a v jiných oblastech s vodou. Zařízení neponořujte do kapaliny.
4. Zařízení používejte v místech s teplotou mezi 10°C a 40°C.
5. Zařízení skladujte v místech s teplotou mezi 20°C a 65°C.
6. Nepokoušejte se připojovat jakýkoliv konektor do nabíjecího/video portu s použitím nadměrné síly. Všechny vhodné konektory by měly jít připojit do portu jednoduše.
7. K nabíjení baterie používejte pouze nabíjecí adaptér, který je součástí originálního balení. Ostatní adaptéry by mohly přístroj poškodit.

